

## DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN DE SONDAS

### FIJADORES DE SONDAS ABDOMINALES

Referencia 9781 (horizontal) y 9782 (vertical)

#### COMPOSICIÓN CUALITATIVA

Lámina de resina sintética de hidrocoloides con adhesivo integrado.

Adhesivo Microporo II.

Brida de material plástico.

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un dispositivo para fijar toda clase de sondas, tubos y catéteres, evitando el uso de suturas, lo que conlleva menores molestias para el paciente, un menor riesgo de infecciones y una excelente sujeción de la sonda, tanto en vertical (Ref. 9782) como en horizontal (paralelo al cuerpo) (Ref. 9781).

Consta de una lámina de resina sintética que actúa eficazmente en la protección de la piel, asegurando una mayor comodidad para el paciente y evitando el uso de otros materiales de curas necesarios cuando se producen irritaciones o maceraciones de la piel.

El adhesivo microporo proporciona una sujeción adicional y permite la transpiración de la piel.

El mecanismo de brida con la zona interior dentada permite fijar las sondas firmemente, sin obstruir su luz y adaptándose a un amplio rango de medidas, entre 5 y 40 French.

Su tiempo de uso oscila entre 5 y 7 días, dependiendo de la temperatura ambiente, del tipo de piel del paciente y de su estado general.

### FIJADOR DE SONDAS NASOGÁSTRICAS

Referencia 9786

#### COMPOSICIÓN CUALITATIVA

- Lámina de resina sintética de hidrocoloides con adhesivo integrado.
- Dorso textil color beige.
- Pinzas giratorias de material plástico.

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un dispositivo para fijar toda clase de sondas nasogástricas de calibres desde 5 a 18 French, eliminando la necesidad del esparadrapo.

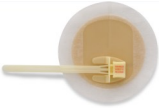
Consta de una lámina hidrocoloide que protege la piel, con una forma anatómica de mariposa que se adapta perfectamente al contorno de la nariz.

Posee un dorso de material textil de color beige, que recubre la lámina, reduciendo brillos y eliminando interferencias en la visión del paciente.

La sujeción de la sonda se realiza mediante una pinza giratoria integrada en la lámina, que posee unas mandíbulas dentadas que proporcionan una sujeción de la sonda, eliminando el riesgo de irritación intra-nasal.

Su tiempo de uso oscila entre 24 y 72 horas, dependiendo de la temperatura ambiente, del tipo de piel del paciente y de su estado general.

## DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN DE SONDAS

| Foto                                                                              | Descripción                                    | Ref.  | Uds/<br>caja | Dimensiones unidad mínima de venta<br>Largo x ancho x alto |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------|------------------------------------------------------------|
|  | Dispositivo horizontal de fijación de sondas   | 9781* | 5 uds        | 23,6 cm x 17,1 cm x 6 cm                                   |
|  | Dispositivo vertical de fijación de sondas     | 9782* | 5 uds        | 23,6 cm x 17,1 cm x 6 cm                                   |
|  | Dispositivo de fijación de sondas de nutrición | 9786* | 20 uds       | 23,6 cm x 17,1 cm x 6 cm                                   |

\*Todos los productos **Hollister** se encuentran libres de ftalatos.

\* Productos no financiados por S.N.S.



**Hollister**

Hollister Ibérica S.A.  
Avda. de Bruselas nº 13, 2º D  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Tel.: 91 383 87 27 Fax: 91 766 92 01  
www.hollister.es

2026