

Sistema de irrigación



Descripción	C.N.	Referencia
Set irrigador	450395	7719

Caja con 1 set de irrigación
Producto financiado por el S.N.S.

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

- Irrigador:
- Bolsa de vinilo.
 - Tubo de cloruro de polivinilo.
 - Válvula de control de flujo de polietileno.
 - Cono de acetato de viniletileno y polietileno.
 - Mangas de irrigación: polietileno.
- Pinza: polipropileno.
Cinturón: poliéster, algodón, goma y nylon.
Cepillo: nylon.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El irrigador Hollister 7719 está constituido por una bolsa de vinilo de alta densidad, con capacidad 1.500 ml. Presenta un tubo por donde circula el agua hacia el estoma, provisto de una válvula de control de flujo, que permite regular la velocidad del flujo de agua, ajustándola a la conveniencia del paciente, para evitar dolores intestinales y retortijones, producidos por un flujo elevado.

En el extremo inferior, el tubo lleva un cono de plástico que se introduce en el estoma para realizar la irrigación. Su forma cónica permite la suave inserción en el estoma, impidiendo la fuga de líquidos y evitando perforar el intestino.

El irrigador está provisto de un sistema de sujeción en su parte superior, que permite colocarlo a la altura más conveniente para el paciente. También, presenta una válvula anti-reflujo, que cierra el irrigador una vez lleno, impidiendo la pérdida de agua por caídas accidentales.

Las mangas de irrigación son de polietileno termosoldadas para evitar roturas o desgarros. Son lavables. Y se encuentran provistas de tres aberturas:

- Superior: por donde se introduce el cono, o se cierra la manga mediante un fleje, una vez efectuada la irrigación.
- Inferior: por donde drenan las heces. Se cierra herméticamente por medio de la pinza adjunta en el set. Esta pinza es curva para adaptarse mejor a la forma del cuerpo.
- Central: la que se aboca al estoma. Está rodeada por una arandela de plástico semirrígido, con orificios para ajustar el cinturón y mantener la manga en su sitio. Tamaño de la abertura 7,6 cm.

Las mangas de irrigación tienen una longitud de 58 cm, para permitir al ostomizado adoptar posiciones confortables, durante el drenaje de las heces.

El cinturón utilizado durante la irrigación, no presenta componentes metálicos para no lastimar la piel. Las presillas para ajustar el cinturón a la manga de irrigación están diseñadas para no producir molestias al paciente.

Una vez terminado el proceso, se realizará la limpieza del irrigador, donde el cepillo incluido en el set, es de especial utilidad para la limpieza del cono ya que presenta el mismo tamaño de orificio.

El irrigador Hollister 7719 se presenta en 1 set conteniendo:

- 1 irrigador
- 12 mangas de irrigación reutilizables de referencia 7724
- 1 cepillo
- 1 pinza
- 1 cinturón

Presentación: caja con 1 set

Dimensiones unidad mínima de venta: 23,3cm largo x 16,4cm ancho x 11,7cm alto

Caducidad: 5 años



Hollister

Hollister Ibérica S.A.
Avda. de Bruselas nº 13, 2º D
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 383 87 27
www.hollister.es